

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N° d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0004344V

Règle appliquée (annexe IX)

- Non Invasif (règle 5 # 1)
- Non Actif thérapeutique
- Non chirurgical
- Non Actif Médical
- Non Actif diagnostique

<i>Description générale</i>	Pieds à sérum à crochets (2 ou 4 crochets en plastique ou inox) mobile sur pieds à 5 branches en aluminium pour porter les paniers porte-sérum ou poches.			
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Schéma + Mode d'emploi + Nomenclature		
<i>Référence lot</i>	Non			
<i>Dispositif raccordé</i>	Non			
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non			
<i>Dispositif stérile</i>	Non			
<i>Stérilisation</i>	Non			
<i>Autoclavable</i>	Non			
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un produit n'attaquant pas l'inox, le plastique ou l'aluminium avec de l'eau savonneuse ou un détergent désinfectant.		
<i>Substance impropre</i>	Produit	attaquant l'inox, le polyamide, l'aluminium et le plastique.		
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Mât : Tube support en acier inoxydable qualité AISI 304, polissage grains 220 de 1000mm x Ø30mm x 1.2mm. Tube coulissant (tige) identique en 1200mm x Ø16mm x 1mm. Pied : A 5 branches en aluminium avec roulette doubles galets en polyamide dont 2 avec frein de serrage. Crochet : A 2 ou 4 branches en plastique ou inox.		
<i>Matières</i>	Tube en inox, pied en aluminium, crochet en plastique ou inox			
<i>Contient du Latex</i>	Non			
<i>Étiquetage</i>	Oui	Sur le haut du tube porteur en thermo-impresion CE/MOD/NOM		
<i>Emballage</i>	Oui	Sous gaine plastique et en carton unitaire ou multiple		
<i>Stockage particulier</i>	Non			
<i>Marquage sur le DM</i>	Non			
<i>Références</i>	45 415 02	45 415 04	45 416 02	45 416 04
<i>Désignation</i>	2 Crochets plastique	4 Crochets plastique	2 Crochets inox	4 Crochets inox
<i>Dimensions (cm)</i>	Annexe 1			
<i>Poids net (kg)</i>	3050	3060	3050	3150
<i>Résistance température (°C)</i>	Max = + 40°C ; Min = -5°C			
<i>Poids de charge (kg)</i>	Max = 2 kg par crochet			
<i>Utilisation</i>	Permet la suspension des paniers porte-sérum ou poches.			
<i>Mode d'emploi</i>	Accrocher les flacons à sérum ou les poches sur les crochets et régler la hauteur souhaitée par l'intermédiaire du tube coulissant en le serrant grâce à la poignée. Si nécessaire bloquer le pied mobile en serrant les roues avec freins (2).			
<i>Précaution d'emploi</i>	Les crochets supportent un poids maximum de 2 kg. La hauteur maximum est de 2100mm, Veillez à ce que la surface au sol soit plane et l'inclinaison inférieure à 5.7° (10% de pente) pour éviter le basculement. Tirer le pied toujours au niveau du mât de 25 mm vers la vis de serrage.			
<i>Recyclage/Récupération</i>	Non/Dans les bacs à métaux.			
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non			
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul			
<i>Normes applicables</i>	NF EN ISO 9001 : 2015 ; NF EN ISO 13485 : 2012 NF EN 1041 : 2008 + A1 : 2013 NF EN ISO 14971 : 2013 NF EN ISO 15223-1 : 2012 NF ISO 15223-2 : 2010			

ANNEXE 1

Pour le montage :

Dévisser le boulon en dessous du pied à sérum et enlever la rondelle. Insérer l'embout noir, fixé sur le tube support, dans le trou au milieu de la base à 5 branches. Par dessous la base, remettre la rondelle puis revisser le boulon.

Veillez nettoyer les deux tubes avant la première utilisation avec un produit nettoyant.

La base est composée de 5 roulettes dont 2 roulettes avec blocage.

REF 45 415 02 = 2 crochets plastiques (1)
REF 45 415 04 = 4 crochets plastiques (2)

REF 45 416 02 = 2 crochets Inox (3)
REF 45 416 04 = 4 crochets Inox (4)

