

Description du DM	Le thermomètre infrarouge JPD-FR202 mesure la température du corps humain ou d'un objet en fonction de l'énergie infrarouge émise par le front ou un objet (comme le lait et l'eau). Vous pouvez obtenir rapidement des résultats de mesure après avoir pointé la sonde de température vers la cible.
Caractéristiques techniques	Plage de mesure Front : 34,9 ° C à 42,2 ° C (94,8 ° F à 108,0 ° F) Objet : 0,0 ° C-100,0 ° C (32,0 ° F-212,0 ° F) Exactitude (Clinique) ±0,3 ° C (±0,6 ° F)
Conditionnement/Emballage	boîte
Composition du dispositif	1. PCBA 2. Écran LCD 3. Coque 4. Capteur 5. Feuille d'électrode
Réutilisable (Oui/Non)	Oui
Méthode de nettoyage et désinfection (<i>si réutilisable</i>)	Détergents recommandés : * Détergents médicaux ; * Utilisez des détergents doux à la maison ; Étapes de nettoyage : 1) Retirez les piles avant de les nettoyer. 2) Nettoyez la température avec un chiffon doux. Nettoyez la lentille de la sonde de température avec un coton-tige. 3) Essuyez le corps du thermomètre avec un chiffon doux légèrement humide. Attention : Gardez l'eau hors de la lentille pendant le processus de nettoyage. Sinon, l'objectif pourrait être endommagé. Attention : La lentille peut être rayée si elle est nettoyée avec un morceau de papier de soie, ce qui peut entraîner des lectures inexactes. Attention : Ne nettoyez pas le thermomètre avec des nettoyants corrosifs. Pendant le processus de nettoyage, ne touchez pas la lentille à l'aide d'objets durs, n'immergez aucune partie du thermomètre dans un liquide et ne laissez pas de liquide pénétrer dans le thermomètre. Désinfectants recommandés : * Solution d'alcool isopropylique (concentration : 70 %) * Alcool médicinal (concentration : 75%) * Solution d'hypochlorite de sodium (concentration : 3 %) Étapes de désinfection : 1) Mouillez le chiffon doux et propre avec une petite quantité de désinfectant, essuyez le thermomètre et séchez-le rapidement. 2) Désinfectez le corps du thermomètre avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool médical à 75 %. Attention : Ne pas utiliser de vapeur chaude ou de rayonnement ultraviolet pour la désinfection. Sinon, le thermomètre peut être endommagé ou vieillir rapidement. Attention : Nettoyez et désinfectez le thermomètre à une température de +10°C~+40°C(50°F-104°F), une humidité relative de 15%-85%RH (sans condensation) et une pression barométrique de 86kPa~106kPa.
Températures min/max supportées	Température de fonctionnement : 10 ° C à 40 ° C (50 ° F à 104 ° F)
Poids net (g)	89g (sans batterie)

Address: D building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-4 号 301、7、8、9、10 层 518103

TEL : +86 755-26696279

电话：+86 755-26696279

FAX : +86 755-26852025

传真：+86 755-26852025

Website: <http://www.jumper-medical.com>

网址： <http://www.jumper-medical.com>

Dimensions LxH (mm)	150mm × 88.2mm × 40.6mm
Accessoires	1 x appareil 2 x piles AAA 1 x manuel d'utilisation 1 x pochette 1 x certificat de qualité du produit
Domaine d'utilisation	maison
Indication d'utilisation	Le thermomètre infrarouge JPD-FR202 est un thermomètre infrarouge sans contact destiné à obtenir la température corporelle à partir du front. Il peut être utilisé par les consommateurs dans un environnement domestique.
Procédé de stérilisation (si DM fourni stérile)	N/A
Péremption (si applicable)	2 années
Méthode de destruction	Jetez les piles usagées avec soin. Pour protéger l'environnement, il est recommandé d'envoyer les piles usagées à un point de collecte désigné. Les déchets de matériel électrique doivent être envoyés à un point de collecte dédié pour recyclage. Vous devez contacter les autorités locales pour déterminer la méthode appropriée d'élimination des pièces et des ACCESSOIRES potentiellement dangereux.
Conditions de stockage (si applicable)	Température : -20 ° C à 50 ° C (-4 ° F à 122 ° F) Humidité : 15 à 95 % d'humidité relative, sans condensation Pression atmosphérique : 50–106 kPa
Température de stockage (si applicable)	-20° C et +50° C (-4° F–122° F)
Incompatibilité chimique	Non
Contre-indications	Non
Population cible	Enfants et adultes
Autres informations	Non

Add.: D building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-4 号 301、7、8、9、10 层 518103

TEL : +86 755-26696279

电话：+86 755-26696279

FAX : +86 755-26852025

传真：+86 755-26852025

 Website: <http://www.jumper-medical.com>

 网址：<http://www.jumper-medical.com>